

Gebruiksaanwijzing Clean 'n Easy Interieur

Beoogd gebruik:


Reinigen van niet-invasieve medisch hulpmiddelen en andere harde oppervlakken in o.a. zorginstellingen, verpleegtehuizen, bejaardentehuizen etcetera.

Hoe te gebruiken:

1. Was uw handen,
2. Trek handschoenen aan (voor hygiënische redenen) *
3. Open de doseerschuiif op de deksel van de emmer en trek er een reinigingsdoek uit,
4. Sluit de doseerschuiif op de deksel van de emmer goed,
5. Reinig het oppervlak met de kant-en-klare reinigingsdoek, als de doek te droog wordt dient er een nieuwe doek uit de emmer gepakt te worden,
6. Gooi de gebruikte doeken weg in een afvalbak,
7. Trek uw handschoenen uit en gooi deze weg in de afvalbak,
8. Was uw handen.

* trek nieuwe handschoenen aan als u naar een andere ruimte gaat om kruisbesmetting te voorkomen.

Het product is voor single-use gebruik.

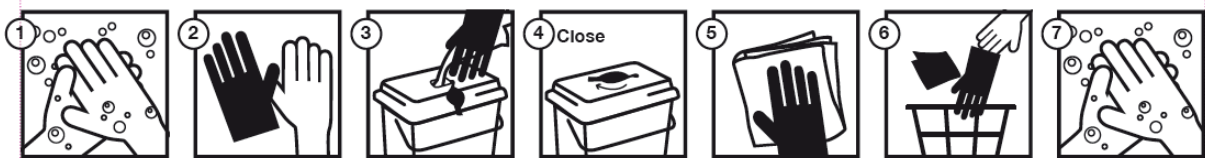

Veiligheid:

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk.

Lees altijd het VeiligheidsinformatieBlad

Na inhalering : Bij overmatig inademen in de frisse lucht brengen.

Na huidcontact : Afwassen met water.

Na contact met de ogen : Contactlenzen verwijderen indien aanwezig. Grondig spoelen met stromend water. Raadpleeg een arts indien zich een irritatie ontwikkeld.

Inslikken : Niet van toepassing

Verpakkingen

02036000	Clean 'n Easy Interior doseeremmer	(1x150 doeken)
02036010	Clean 'n Easy Interior refill	(3x150 doeken)

Bewaartemperatuur : 5-30°C
Houdbaarheid : zie label

